

gigazyme® X-tra

Βασισμένο σε ένζυμα απορρυπαντικό υψηλής απόδοσης με απολυμαντικές ιδιότητες για τον καθαρισμό των ενδοσκοπίων και χειρουργικών εργαλείων.



Τα πλεονεκτήματα:

Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού σε συνδυασμό με προστασία του προσωπικού και του περιβάλλοντος

Κατάλληλο για χρήση σε Λουτρά Υπερήχων

Άριστη συμβατότητα με τα υλικά

Περιοχές εφαρμογής,

Ιδανικός συνδυασμός με υψηλής ποιότητας ένζυμα και ένα καινοτόμο σύστημα επιφανειοδραστικών ουσιών επιτρέπει τον εξαιρετικό καθαρισμό Θερμοευαίσθητων και θερμοάντεχων οργάνων οποιουδήποτε είδους. Επιπλέον η βασική απολυμαντική επίδραση του gigazyme® X-tra προστατεύει το προσωπικό από τη μόλυνση του και το περιβάλλον από τα λοιμώδη παθογόνα όπως, για παράδειγμα, τον ιό HIV και HBV.

Οδηγίες / πληροφορίες Για την χρήση του gigazyme® X-tra

Το gigazyme® X-tra είναι πυκνό και αραιώνεται με κρύο νερό στην επιθυμητή συγκέντρωση. Ενδοσκόπια και εργαλεία, τα οποία πρόκειται να επεξεργασθούν,

τοποθετούνται στο παρασκευασμένο διάλυμα, έτσι ώστε η επιφάνεια να καλύπτεται πλήρως και ο αέρας να έχει αφαιρεθεί εντελώς από τον αυλό. Μετά τον καθαρισμό των ενδοσκοπίων και των εργαλείων, ξεπλύνετε επιμελώς με νερό και συνεχίστε την προετοιμασία του ενδοσκοπίου ή των εργαλείων σύμφωνα με τα κατάλληλα πρωτόκολλα που εφαρμόζεται. Λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα της ρυπαρότητας αντικαταστήστε το διάλυμα χρήσης τουλάχιστον μια φορά την ημέρα. Μην αναμιγνύετε το gigazyme® X•tra με απολυμαντικά και άλλα απορρυπαντικά. Δεν είναι κατάλληλο για την τελική απολύμανση αντικειμένων που πρέπει να μετέχουν σε ημικρίσιμες και κρίσιμες Ιατρικές πράξεις.

Συγκεντρώσεις χρήσης / χρόνος επαφής

Όλες οι συγκεντρώσεις προορίζονται για καταστάσεις υψηλής ρυπαρότητας. Οι συγκεντρώσεις επίσης ισχύουν για τη χρήση στο λουτρό υπερήχων.

1% 30 λεπτά-> βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και περιορισμένο ιοκτόνο

2% 15 λεπτά-> βακτηριοκτόνο μυκητοκτόνο και περιορισμένο ιοκτόνο

Για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού και την καλύτερη δυνατή ασφάλεια του προσωπικού σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε διάλυμα 2%.

Πληροφορίες για το προϊόν

100 g gigazyme® X•tra περιέχει τα παρακάτω ενεργά συστατικά :
7.7 g of didecyldimethylammonium chloride,
0.4 g of polyhexamethylene biguanide
Labelling according to Directive (EC) No. 648/2004:
15 – 30% of non-ionic surfactants, enzymes, perfumes

Φυσικοχημικά δεδομένα

Πυκνό :
Εμφάνιση πράσινο:
pH value: περίπου 7.5 (20 °C)

Labelling according to EC Directives:

Xi Irritant
N Dangerous for the environment
R38 Irritating to skin.
R41 Risk of serious damage to eyes.
R50/53 Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
S26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
S39 Wear eye/face protection.
S61 Avoid release to the environment. Refer to special instructions/ Safety data sheets.

Forms of Supply / Packaging Units

Pack size	Packaging units	Item no.
2 l bottle	5 x 2 l	129101
5 l canister	1 x 5 l	129102