

# Mikrozyd® universal wipes green line- 114pcs CE0297



**Μαντηλάκια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και επιφανειών.**



**Fast**



**Effective**



**Excellent material compatibility**



**Environmentally friendly**

Κατάλληλο για εξοικονόμηση υλικών, απλή και γρήγορη απολύμανση επιφανειών, συμπεριλαμβανομένων No toxic substances released by plastic incineration

No microplastics, ακρυλικό γυαλί, Polysulfon ή τεχνητό δέρμα καθώς και επιφάνειες και συσκευές όπως οθόνες, πληκτρολόγια, πίνακες ελέγχου, οθόνες αφής ευαίσθητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.



**100 % plastic-free wipes**



**Guaranteed mikrozyd® quality**



**Sustainable & climate-neutral**

- Μαντηλάκια κατασκευασμένα από 100% ανανεώσιμες πρώτες ύλες (πιστοποίηση FSC)

- 25 % μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα από το PET ή άλλα μαντηλάκια βιολογικής προέλευσης
- Δεν απελευθερώνονται τοξικές ουσίες με αποτέφρωση πλαστικών
- Χωρίς μικροπλαστικά

**Οδηγίες χρήσης:** Σκουπίστε προσεκτικά με το εμποτισμένο μαντηλάκι και αφήστε το να δράσει. Βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως υγρή η επιφάνεια. Για τους μικροοργανισμούς adenovirus και mycobacterium tuberculosis βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι υγρή καθόλη τη διάρκεια της δράσης. Τα μαντηλάκια γίνονται κίτρινα μετά από παρατεταμένη έκθεση στον αέρα. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλοι οι ρύποι, πριν την απολύμανση. Βεβαιωθείτε ότι κλείσατε στεγανά το καπάκι μετά τη χρήση. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς γάντια αν το επιτρέπει η μόλυνση. Μη κατάλληλο για την απολύμανση κρίσιμου και ημι-κρίσιμου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

**Χρόνος επαφής:** Βακτηριοκτόνο <sup>1)</sup> – 1 λεπτό, Ζυμομυκητοκτόνο <sup>2)</sup> – 1 λεπτό, Ιοί με φάκελο <sup>3)</sup> -15 δευτ. , Περιορισμένου φάσματος δράση κατά των ιών <sup>3)</sup> - 15 λεπτά, Polyoma SV40 <sup>5)</sup> - 15 δευτ., Φυματιοκτόνο <sup>4)</sup>-5 min, Νοροϊός <sup>6)</sup> – 30 δευτ.,  
<sup>1)</sup>EN13727 +EN 16615/ καθαρές συνθήκες, <sup>2)</sup> EN13624+EN16615/καθαρές συνθήκες, <sup>3)</sup> EN 14476/με μεγάλη επιβάρυνση, <sup>4)</sup> EN14348/καθαρές συνθήκες,<sup>5)</sup> DDV/RKI 12/2014 σύμφωνα με DVV (German Registered Association for Combating Viral Diseases/Οδηγία RKI 12/2014, <sup>6)</sup> MNV EN 14476/καθαρές συνθήκες.

**Σύνθεση:** Μία συσκευασία περιέχει 114 έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια (180mmX200mm) . 100 g διαλύματος περιέχουν τα παρακάτω ενεργά συστατικά: 17,4 g Propan-2-ol, 12,6 g Ethanol (94% w/w). **Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 648/2004:**<5% ανιονικά επιφανειοδραστικά.

**Ειδικές σημειώσεις:** Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Προστατεύεται από ψύξη, θερμότητα και ηλιακή ακτινοβολία. Διατηρείται στο αρχικό δοχείο και σε θερμοκρασία δωματίου. Ανακυκλώνετε μόνο τις άδειες συσκευασίες. Το υπόλοιπο προϊόν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η καταλληλότητα του φάσματος δράσης πρέπει να ελέγχεται όσον αφορά τη σκοπούμενη χρήση. Το εύρος καθαρισμού εξαρτάται από τη θερμοκρασία δωματίου και τη δομή της επιφάνειας που πρόκειται να απολυμανθεί. Διαθέσιμη περισσότερη πληροφόρηση κατόπιν αιτήματος. Μόνο για επαγγελματική χρήση. Οποιαδήποτε ανεπιθύμητα συμβάντα που σχετίζονται με το προϊόν θα πρέπει να αναφέρονται στον Κατασκευαστή και τις Αρμόδιες Αρχές.

**Σημειώσεις επισήμανσης κινδύνου και συμβουλές ασφαλείας: ΠΡΟΣΟΧΗ: H226** Υγρό και ατμοί εύφλεκτα **H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό **P102** Μακριά από παιδιά **P210** Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. **P305+P351+P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **P337+P313** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. **P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:2107793777

**Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.** Λεωφ. Κηφισού 132 TK 12131 Περιστερί, Ελλάδα.

Τηλ. Κέντρο: 210 5199200.